

Neinvazivna kirurgija

Pripomoček Plexr® predstavlja neinvazivno kirurgijo in je odlična alternativa klasični kirurgiji. Neinvazivna kirurgija je bila zasnovana za vse, ki si želijo odpraviti kožne madeže, visečo kožo, gube na bolj prijazen način. Doseženi rezultati so popolnoma primerljivi s tradicionalnimi metodami za številna zdravljenja.

Prednosti

- Brez trajnih stranskih učinkov
- Zelo malo zaznane bolečine: 30 minut pred terapijo se lokalno nanese anestetična krema
- Hitro okrevanje
- Nižji stroški v primerjavi s klasično operacijo

Glavni načini uporabe

- ✕ Neoperativna blefaroplastika
- ✕ Terapija za gube
- ✕ Odstranjevanje fibroidov, pigmentih znamenj, bradavic, brazgotin, ksantelazm, keratoz
- ✕ Aktivna nega proti aknam
- ✕ Korekcija odvečne dlesni in depigmentacija dlesni

Plexr® Plus by GMV



Plexr® plus

www.gruppogmv.com

Vedno izberite največjo učinkovitost in varnost! Medicinski pripomoček Plexr® podjetja GMV, certificiran v skladu z Direktivo Sveta 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih. Pripomoček Plexr® podjetja GMV je na trgu v več kot 50 državah, je uvedel tehnologijo plazme v estetsko medicino, njeno uporabo pa zdravniki po vsem svetu nenehno preučujejo in posodablajo.

 **TEHMED**
MEDICAL SERVICE SOLUTIONS

Uradni zastopnik za Slovenijo: TehMed d.o.o., Neubergerjeva 7, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)41 759 403, info@tehmed.si, www.tehmed.si

Razvoj plazme
v estetski medicini

Plexr® Plus by GMV





ZDRAVLJENJE KOŽNIH MADEŽEV IN NEPRAVILNOSTI NA KOŽI ŠE NIKOLI NI BILO TAKO PREPROSTO.

Čemu je namenjen?

Pripomoček Plexr® lahko pomaga pri različnih nepravilnostih kože. Zelo uspešen je pri terapijah za odstranitev benignih tvorb in elastične retrakcije, kar ustvari lifting kože.

Kako deluje?

Plexr® je pripomoček, ki ionizira zrak med svojim terminalom in epidermisom ter tako ustvari mikroplazemski žarek. Plazma je s fizikalnega vidika četrto agregatno stanje, kjer se ioni nastali iz molekul nevtralnega plina srečajo v prostem stanju. Mikroplazemski žarek v stiku z epidermisom sublimira* korneocite tj. zgornje celice, ki tvorijo zaščitno plast epidermisa. Količina energije hkrati selektivno doseže pravo globino dermisa brez obsevanja (laser/svetloba) ali električnega udara (napetost/tok). Ta stimulacija omogoča takojšnje krčenje in reorganizacijo kolagenskih vlaken, tvorbo novega kolagena in obnovo epidermalnega tkiva.

* fizikalni proces pri katerem pride do izhlapevanja snovi, ki je sprva v trdem stanju, ne da bi prešla v tekoče.

Kako dolgo traja terapija?

Trajanje terapije se razlikuje glede na vrsto posega, vendar nikoli ne preseže 30 minut. Nekatere terapije trajajo le nekaj minut.

Ali obstajajo kontraindikacije?

V kolikor zdravljenje s pripomočkom Plexr® podjetja GMV izvaja izkušeno in usposobljeno osebe ni trajnih stranskih učinkov. Kraste, otekline in rdečica so del običajnega postopka in obnove kože. Ta potek običajno traja 7-20 dni. Priporočljivo je, da upoštevate navodila za nego po posegu, ki jih prejmete po opravljenem postopku.



Primeri terapij (prej/potem)


Seboroične bradavice



Ksantelazme



Gubice

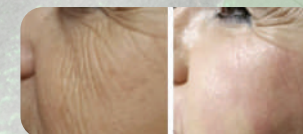

Blefaroplastika



Kako dolgo bodo vidni rezultati? Ali so trajni?

Rezultati so vidni po nekaj dneh (ko se koža obnovi) in so popolnoma trajni. Pri nekaterih vrstah terapije bo morda potreben več kot en poseg, da se poveča učinkovitost rezultatov.

Ali je terapija boleča?

Terapija je neboleča. Lahko pa se pojavi pekoč občutek. Zato se na del, kjer bo izvedena terapija, 30 minut pred posegom nanese majhna količina anestetične kreme.